

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA BADANIA BIEGŁOŚCI (PT)
W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI SEROLOGICZNEJ NIEDOKRWISTOŚCI
ZAKAŻNEJ KONI W 2026 ROKU**

W ramach badań biegłości (PT) w zakresie diagnostyki serologicznej niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) testem immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID), Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. niedokrwistości zakaźnej koni przekaże Państwu:

- 4 próbki surowicy w postaci liofilizatu - każda zaopatrzona odpowiednim kodem, do przeprowadzenia badań w zakresie wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) testem immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID).

Próbki będą wysłane do dnia 22.06.2026 r.

Instrukcja przygotowania próbek do badania:

- Otrzymane fiolki (liofilizaty) do momentu badania powinny być przechowywane w temperaturze 2°C ÷ 8°C.
- Do każdej fiolki dodać po 1 ml jałowej wody destylowanej.
- Fiolki pozostawić w temp. otoczenia do całkowitego rozpuszczenia liofilizatu, a następnie dokładnie wymieszać ich zawartość.
- Badanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta testu.

Badania należy wykonać do 11 września 2026 r. zgodnie z obowiązującymi w Państwa laboratoriach procedurami badawczymi/instrukcjami odnoszącymi się do testu immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID).

Każdy uczestnik PT zobowiązany jest do wykonania badań bez porozumiewania się z innymi laboratoriami biorącymi udział w PT.

Uzyskane wyniki należy wprowadzić do formularza wyników znajdującego się w portalu e-klient, który jest dostępny na stronie eklient.piwet.pulawy.pl po zalogowaniu się Uczestnika, w zakładce **Badania biegłości/ Niedokrwistość zakaźna koni/ formularz wyników** w nieprzekraczalnym terminie **do 11 września 2026 r.**

Sprawozdanie z badań biegłości będzie dostępne na platformie e-klient **od 5 października 2026 r.**